

Pokyny pro měření

Pomiar na stopie

Obuv na míru se vyrábí vždy na základě individuálních parametrů.

Pro výrobu je nutné změřit tyto parametry:


- Kontura chodidla/nohy v ortéze
 - A - Obvod přes klouby (nejširší část)
 - B – Obvod přes nárt (v nejširším bodě)
 - C – Obvod přes patu (přes kotník a patu)
 - D – Obvod nad kotníkem*
- *nejlépe napsat v jaké výšce od země byla daná hodnota naměřená (např. 24/10 – ve výšce 10 cm od země bylo naměřeno 24 cm)*



Kontura chodidla/ortézy:


- E – Délka chodidla (nejdelší část)
- F – Šířka přes klouby (nejširší část)
- G – Šířka paty

*F – v případě složitější korekce je vhodné na obrys nohy nakreslit kde jsou polštářky pod prsty, pata a další odchylky (např. vybočený malíček/palec)

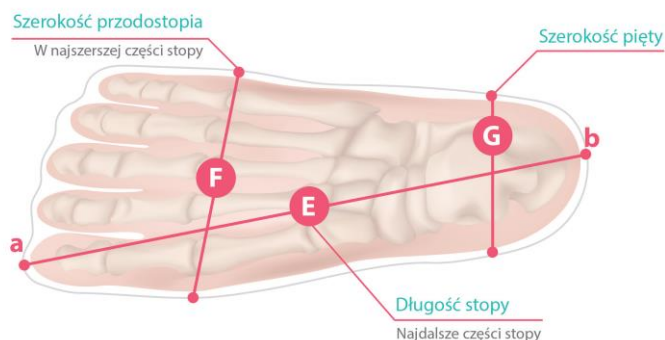

V případě, kdy se jedná o komplikovanější typ korekce je vhodné nohu vyfotit/udělat video, napsat, jak by se měla obuv chovat.


Do nákrasů vypisovat naměřené hodnoty v cm.

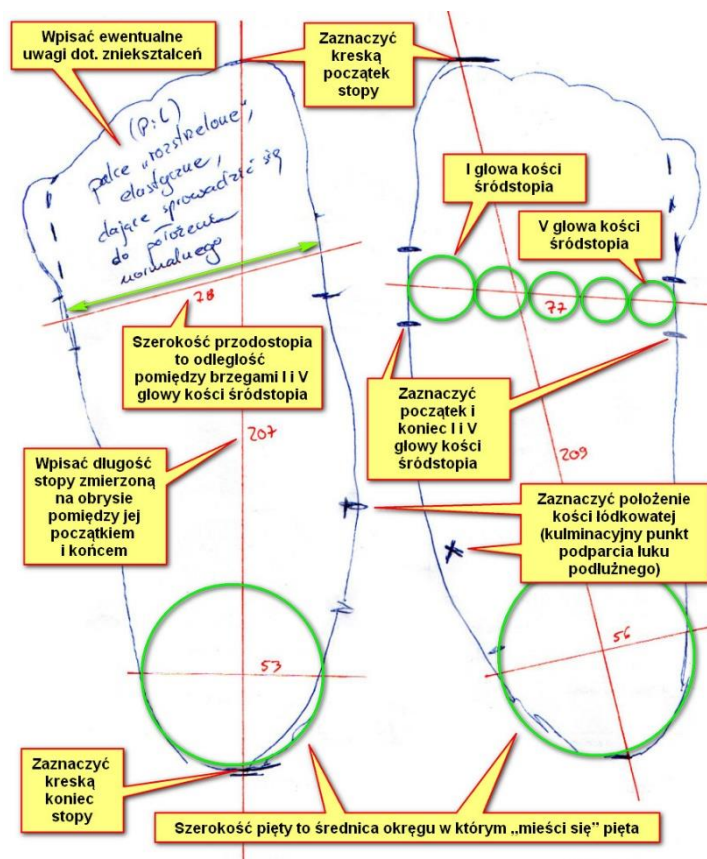

Postup pro naměření délky chodidla/ortézy:


1. Stát na papíře a obkreslit konturu chodidla, kdy tužka musí být držena pod pravým úhlem
2. Změřit nejdelší část chodidla

(pro kontrolu správného měření je vhodné měřit obě nohy)

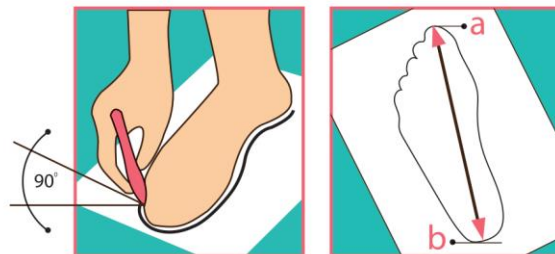

V individuálních případech je vhodné provést další měření:

- Obvod přes prsty
- H – Výška prstů
- I – Výška kloubu palce
- J – Výška nártu

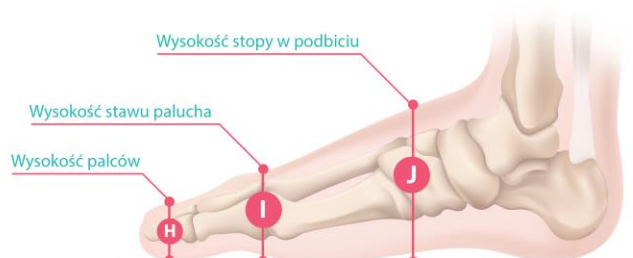

Korekční obuv:

V případě, že v obuvi bude nošena **ponožka** či **individuální vložka**, je nutné nohu změřit v ponožce / s vložkou.

Poté **obkreslit** 1x nohu s ponožkou a 1x vložku (noha musí stát na vložce).

Na obkreslené noze/vložce **změřit a zaznačit body E, F a G**.

Rozměr vložky bude mít zásadní vliv na velikost obuvi.

Výrobce požaduje z průběhu měření **fotografie**, na kterých musí být viditelné ve kterých místech bylo měřeno. Tímto předejdeme případným nesrovnalostem ve velikosti obuvi.

Obuv pro ortézy:

Nohu měřit v ortézce, vždy obě nohy. Vždy brát v potaz místo, kde se nachází **suchý zip**. To znamená naměřit vždy **nejširší místo**.

Nohu v ortézce obkreslete tak, jako by se jednalo o nohu, tedy dle „Postup pro naměření délky chodidla“.

Je nutné brát v potaz případný rozdíl mezi spodní hranou ortézky a patou.